



## PACS Scan

PACS Scan, PACS Scan XDS, PACS Scan Film

# Guide d'installation

DOC-PS6.1-IN-FR-REVA

# Notice de documentation

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document n'est fourni que dans le cadre d'un accord de licence distinct et ne peut être utilisé ou copié que selon les termes de cet accord. Il est interdit par la loi de copier le logiciel, sauf si le contrat de licence l'autorise expressément. Le présent document ou les documents associés sont susceptibles de contenir certaines informations confidentielles de la société Hyland Software, Inc. et de ses affiliés, conformément aux dispositions de confidentialité que vous avez acceptées.

Le respect de toutes les lois applicables sur les droits d'auteur est de la responsabilité de l'utilisateur. Sans limiter les droits de la loi sur les droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Hyland Software, Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Hyland, HXP, OnBase, Alfresco, Nuxeo et les noms de produits sont des marques déposées et/ou non déposées de Hyland Software, Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées, marques de service, noms commerciaux et produits d'autres sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Hyland Software, Inc. et ses sociétés affiliées.

Les informations mentionnées dans ce document peuvent contenir des technologies telles que définies par les réglementations EAR (Export Administration Regulations) et peuvent être soumises aux lois sur le contrôle des exportations du gouvernement des États-Unis, notamment pour l'EAR et les sanctions commerciales et économiques appliquées par l'Office of Foreign Assets Control (Office du contrôle des actifs étrangers), ainsi qu'aux lois sur le contrôle des exportations de la juridiction locale de votre entité. Le transfert d'une telle technologie par quelque moyen que ce soit à une personne étrangère, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, pourrait nécessiter une licence d'exportation ou une autre approbation du gouvernement des États-Unis et de l'autorité d'exportation de votre entité. Il vous incombe de vous assurer que vous disposez des approbations requises avant l'exportation.

## Réglementation et conformité



**Fabricant**  
**Hyland Software, Inc.**  
12919 Earhart Ave.  
Auburn, CA 95602 USA

**Assistance**  
Téléphone: 1-844-535-1404  
Web: <https://community.hyland.com>

## Avertissements généraux et précautions



Pour garantir la sécurité des patients et le respect des normes HIPAA en matière de confidentialité des informations sur le santé des patients, le prestataire de soins de santé doit attribuer un numéro d'accès et un numéro de dossier médical (NDM) uniques permettant d'identifier le dossier médical de chaque patient, afin d'éviter toute erreur dans les données médicales et la confusion avec d'autres patients.

## Glossaire des symboles



3082 – Fabricant



2497 – Date de fabrication



2493 – Numéro de catalogue



2498 – Numéro de série



1641 – Consulter le mode d'emploi : indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi.



0434A – Attention : indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir des informations importantes telles que les avertissements et précautions à prendre.



2610 – Numéro du patient : indique un numéro unique attribué à un patient individuel.



Quantité : indique le nombre d'unités.



Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



ISO/DIS ISO 15223-1 – Dispositifs médicaux – Symboles à appliquer à utiliser avec les étiquettes et les informations à fournir relatives aux dispositifs médicaux.

Indique que l'article est un dispositif médical.

# Table of Contents

<b>Notice de documentation</b> .....	<b>2</b>
<b>Réglementation et conformité</b> .....	<b>3</b>
<b>Avertissements généraux et précautions</b> .....	<b>3</b>
<b>Glossaire des symboles</b> .....	<b>4</b>
<b>Télécharger et extraire le programme d'installation de PACS Scan</b> .....	<b>6</b>
<b>Télécharger le programme d'installation de PACS Scan depuis le disque d'installation</b> .....	<b>6</b>
<b>Installer PACS Scan</b> .....	<b>6</b>
<b>Licence PACS Scan</b> .....	<b>7</b>
<b>Chemins d'accès de mise à niveau pris en charge</b> .....	<b>7</b>

## Télécharger et extraire le programme d'installation de PACS Scan

Pour télécharger et extraire le programme d'installation de PACS Scan sur l'ordinateur hôte, effectuez l'une des étapes suivantes.

1. À partir d'un navigateur, accédez à l'URL fournie par votre représentant Hyland.
2. Si vous y êtes invité(e), indiquez un répertoire de destination et cliquez sur **OK** pour télécharger le fichier d'installation compressé.
3. Naviguez jusqu'au dossier contenant le programme d'installation téléchargé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez l'option d'extraction pour extraire le contenu dans le dossier d'installation approprié.

## Télécharger le programme d'installation de PACS Scan depuis le disque d'installation

Pour télécharger le programme d'installation de PACS Scan sur l'ordinateur hôte depuis le disque d'installation, effectuez l'une des actions suivantes.

- Insérez le disque d'installation de PACS Scan dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur hôte. Sous Windows, copiez le répertoire d'installation du CD-ROM dans le dossier d'installation approprié.

## Installer PACS Scan

Pour installer PACS Scan, effectuez les étapes suivantes.



PACS Scan est installé avec un jeu d'autorisations générique. Veuillez vérifier les autorisations du répertoire d'installation et modifiez-les si nécessaire.

1. Accédez au dossier d'installation de PACS Scan, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier *PacsSCAN Setup.exe*, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

**Note:** Si l'invite du contrôle de compte d'utilisateur Windows apparaît, cliquez sur **Oui**.

2. Dans l'assistant InstallShield, dans la liste **Sélectionner la langue d'installation**, sélectionnez une langue et cliquez sur **OK**.

**Note:** Si l'assistant InstallShield vous invite à installer les composants requis, cliquez sur **Installer**.

3. Dans la boîte de dialogue **Bienvenue dans l'assistant InstallShield de PACS Scan**, cliquez sur **Suivant**.
4. Sur la page **Contrat de licence**, cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**, lisez jusqu'au bas du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sur la page **Type d'installation**, effectuez l'une des actions suivantes.
  - Sélectionnez **Complet** pour installer toutes les fonctionnalités du programme et utiliser le répertoire par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.
  - Sélectionnez **Personnalisé**, puis cliquez sur **Suivant**. Sur la page **Installation personnalisée**, sélectionnez les fonctionnalités du programme que vous souhaitez installer et l'emplacement où vous souhaitez les installer, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Sur la page **Prêt à installer le programme**, cliquez sur **Installer**.  
InstallShield commence à installer PACS Scan. Si vous y êtes invité(e), suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer toute configuration requise ou prérequis manquante.
7. Sur la page **Fin de l'assistant InstallShield**, cliquez sur **Oui, je souhaite redémarrer mon ordinateur maintenant**.
8. Cliquez sur **Terminer**.

## Licence PACS Scan

Pour assigner une licence à PACS Scan, effectuez les étapes suivantes.

1. Pour démarrer PACS Scan, double-cliquez sur le symbole de bureau **PACS Scan**.
2. Dans la boîte de dialogue **Licence PACS Scan**, dans la zone **ID système**, notez l'ID du système.
3. Pour obtenir une clé de licence, consultez le site Web <https://community.hyland.com> ou envoyez un e-mail à l'adresse [key-pacsgear@hyland.com](mailto:key-pacsgear@hyland.com). Dans le corps de l'e-mail, saisissez les informations suivantes.
  - Nom du site
  - Ville, état/province
  - Pays/Région
  - Nom du produit
  - ID du système
  - Département/Poste de travail
4. Lorsque vous recevez votre clé de licence, saisissez-la dans la zone **Clé de licence**.
5. Pour installer une démonstration, cochez la case **Activer la démonstration**. Dans la zone **Expiration**, saisissez la date d'expiration.
6. Cliquez sur **OK**.

## Chemins d'accès de mise à niveau pris en charge

Cette version de PACS Scan a été validée pour une mise à niveau à partir des versions suivantes :

- PACS Scan 5.3.3 vers PACS Scan 6.1.0
- PACS Scan 6.0.0 vers PACS Scan 6.1.0